

CONDIȚII DE RECOLTARE, STOCARE ȘI TRANSPORT PROBE BIOLOGICE

Dublu Test (PAPP-A, free-beta HCG)	SCREENING PRENATAL SANGE MATERN	Sange periferic in tub clot activator	5 ml	<p>Se recolteaza sange periferic in tub clot activator (dop rosu).</p> <p>Lasati proba cca 1 ore la temperatura camerei dupa care se trimite la laborator sau centrifugati, separati serul si il plasati in frigider +4°C. Pentru pastrare mai mult de 48h serul se plaseaza la -20°C.</p>	Livrare in max 48 h. La temp +4°C constant (sau cum am procedat pana acum)
Surditate ereditara mutatia 35delG	MOLECULARE	Sange	5 ml	<p>Se colecteaza sange periferic in tub cu EDTA (dop mov)</p> <p>Se recolteaza intr-un tub steril non-pyrogenic.</p>	<p>La rece, la +4°C constant. Livrare in max 48 h.</p> <p>Nu se pune la centrifuga! Dupa recoltare se pune eprubeta in frigider si se scoate inainte de trimiterea prin curier in gentuta speciala.</p>
Fibroza chistica gena CFTR mutatia DF508	MOLECULARE	Sange	5 ml	Se colecteaza sange periferic in tub cu EDTA (dop mov)	La rece, la +4°C constant. Livrare in max 48 h.

				Se recolteaza intr-un tub steril non-pyrogenic.	Nu se pune la centrifuga! Dupa recoltare se pune eprubeta in frigider si se scoate inainte de trimiterea prin curier in gentuta speciala.
Atrofia musculara spinala (SMA)	MOLECULARE	Sange	5 ml	Se colecteaza sange periferic in tub cu EDTA (dop mov) Se recolteaza intr-un tub steril non-pyrogenic.	La rece, la +4°C constant. Livrare in max 48 h.
Placental Growth Factor (PIGF)	SCREENING PRENATAL PREECLAMPSIE DIN SANGE MATERN	Sange periferic in tub clot activator	5 ml	Se recolteaza sange periferic in tub clot activator (dop rosu). Lasati proba cca 1 ore la temperatura camerei dupa care se trimite la laborator sau centrifugati, separati serul si il plasati in frigider +4°C. Pentru pastrare mai mult de 48h serul se plaseaza la -20°C.	Livrare in max 48 h. La temp +4°C constant (sau cum am procedat pana acum).